

Pojízdné chodítko s podnožkou


Pojízdné chodítko s podnožkou je pomůcka určená pro osoby se sníženou pohyblivostí - poskytuje oporu při chůzi, zvyšuje stabilitu.

Použití

- Postavte chodítko před sebe a umístěte ho tak, aby všechna čtyři kolečka pevně stála na zemi.
- Opatrně se pohybujte dopředu a posouvajte chodítko díky čtyřem kolečkům, které umožňují jeho plynulý pohyb.
- Vždy si udržujte vzpřímenou polohu. Pamatujte, že rukověti jsou výškově nastavitelné, aby zabezpečily ideální polohu a předešly problémům se zády.



Nastavení výšky

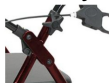

Výška chodítka se musí přizpůsobit každému uživateli. Pro nastavení výšky použijte pojistný kolík umístěný na rukovětích.

Brzdění



Vždy aktivujte a deaktivujte zámky kol na obou stranách současně.



Ke zpomalení nebo dočasnému zastavení potáhněte brzdové páčky směrem nahoru čtyřmi prsty, jak je znázorněno na obrázku, až dokud se chodítko nezpomalí nebo nezastaví.



K dočasnému zablokování kol zatlačte brzdové páčky směrem dolů, jak je znázorněno na fotografii, až dokud neuslyšíte "kliknutí", které signalizuje, že kola jsou zablokována.

Upozornění

- Před každým použitím, zejména po rozložení, vždy zkontrolujte, zda je chodítko úplně otevřené.
- Ujistěte se, že brzdy jsou zablokovány, když si sedáte.
- Zkontrolujte, zda jsou rukověti nastavené do stejné výšky a zda výška odpovídá uživateli.
- Při používání chodítka mějte na paměti, že jeho stabilita závisí na tom, aby byla všechna kolečka v kontaktu se zemí.
- Toto chodítko se smí používat pouze na rovných a pevných površích.
- Používání na jiném typu povrchu může snížit jeho stabilitu.
- Zkontrolujte, zda se chodítko snadno skládá a rozkládá.
- Nikdy nepřekračujte maximální nosnost chodítka.

Jak ho čistit

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky k čištění chodítka.
- K běžnému čištění postačí měkký hadřík a teplá mýdlová voda.
- Nepoužívejte materiály, které by mohly poškrábat rám.
- Zkontrolujte, zda se kolečka volně otáčejí a jsou v dobrém stavu.
- Pamatujte, že do osy kol se často zachytávají nitě, vlasy a jiné nečistoty, které mohou bránit jejich volnému otáčení.
- Pravidelně kontrolujte šrouby a matice.
- V případě potřeby vyměňte kolečka za nová.

Parametry

Celková výška	79 - 90cm
Celková šířka	62 cm
Celková hloubka	79 cm
Výška sedadla	55 cm
Rozměry sedadla	34 x 31 cm