

Přenosná chirurgická odsávačka patří mezi novou generaci bezolejových zařízení. Je vhodná pro pacienty, kteří mají problém se zahleněním během nemoci, kómatu nebo po operačních stavech.

Je navržena pro odsávání tělesných tekutin jako je hnis nebo krv.

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Příklad je určen pro použití kvalifikovaným personálem - lékař, zdravotník, sestra, asistent.
- Příklad v domácím prostředí smí používat pouze dospělá osoba.
- Příklad se nesmí rozebírat ani opravovat nekvalifikovaným personálem.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1) Před každým použitím zkontrolujte stav přístroje. Zkontrolujte napájecí kabel a nepřipojujte jej do zástrčky, pokud je poškozen.

2) Před připojením zařízení vždy zkontrolujte, zda údaje uvedené na etiketě, data a typ použitého konektoru, odpovídají těm z elektrické sítě, do které to má být připojeno. Použití jednoduchých nebo vícenásobných a/nebo prodlužovacích adaptérů se obecně nedoporučuje.

3) Dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené pro elektrické spotřebiče, zejména:

- Používejte originální součásti a příslušenství, které dodává výrobce.
- Příklad může být použit pouze s antibakteriálním filtrem.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Umístěte přístroj na stabilní a rovný povrch.
- Umístěte zařízení tak, aby nebyl přívod vzduchu na zadní straně zakryt.
- Nepoužívají v přítomnosti hořlavých látek, jako anestetika, kyslík nebo oxid dusný.
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama a vždy předcházejte styku spotřebiče s kvapalinami.
- Udržujte mimo dosah dětí nebo mimo lidi, kteří musí být pod dozorem.
- Nenechávejte spotřebič připojen k elektrické zásuvce, pokud se nepoužívá.
- Netahejte za napájecí kabel při odpojení ze zástrčky, ale vytáhněte kabel ze zástrčky.
- Zachovejte a používejte lékařské zařízení v prostředí chráněném od atmosférických vlivů a v určité vzdálenosti od zdrojů tepla.
- Nepoužívejte zařízení při hrudní drenáži.

4) Používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenes odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo zapojení k elektrickému systému, které není v souladu s platnými předpisy, nebo v důsledku pozměňování přístroje.

5) Příklad nesmí být instalován a používán u mobilních a přenosných RF komunikačních zařízeních (mobilní telefony, vysílače, atd.), které mohou rušit uvedené zařízení.

6) Domácí použití: Udržujte veškeré příslušenství k danému zařízení mimo dosah dětí mladších 36 měsíců, protože obsahuje malé části, které mohou spolknout.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE ODSAVAČKY 15 l/min

Model	7E-C
Typologie (MDD 93/42/EEC)	Zdravotnický prostředek třídy II B
Příkon	90VA
Napájení	220V ± 10% 50Hz ± 2%
Maximální saní	≥0,075Mpa (760mmHg)
Rozsah regulace záporného tlaku	Od 0,02 MPa až do limitu záporného tlaku
Rychlost odsávání	15L/min (760mmHg)
Velikost nádoby	1000ml
Hluk	≤65dB
Váha	4,4kg
Rozměry	370 x 180 x 280 (mm)
Provozní podmínky Teplota místnosti:	5 ÷ 35°C
Provozní podmínky	Teplota místnosti: 5 ÷ 35 °C Vlhkost místnosti: 30 ÷ 80% RH Atmosférický tlak: 86kPa ~ 106kPa
Skladové podmínky	Teplota místnosti: -40 ÷ 55 °C Vlhkost místnosti: 10% ÷ 93% RH
Pracovní cyklus	30 min. zapnuté, 30 min. vypnuté .

Balení obsahuje:

Sací hadice délka 2m Ø 7 x 12 - 1 x

Sací katetr - 1 pro dítě a dospělého

Pojistka - F1,5 AL 250V, Ø 7 x 12

F2AL250 V Ø5 x 20

F4 AL 250 V, Ø 5 x 20

Antibakteriální filtr -1 x

Návod - 1 x

Způsob provozu

- bez olejová pumpa udržuje prostředí čisté a bez olejových výparů

- tichý provoz

- manometr záporného tlaku a plastový kryt

- během provozu se negeneruje žádný pozitivní tlak, což zajišťuje

spolehlivou a bezpečnou provoz

- regulace záporného tlaku je postupně nastavitelná

Diagram provozu

Pokud je zařízení skladováno v teplotách nižších než 5°C, před jeho použitím je třeba ponechání zařízení v běžné provozní teplotě alespoň 4 hodiny před jeho použitím.

Poznámka


V případě zablokovaného katetru použijte následující metodu:

Ohněte vodič odsávání do tvaru „V“, (bez tekutiny v držáku), a následně uvolněte do původního stavu dokud nízký tlak dosáhne své maximální hodnoty. Opakujte metodu několikrát dokud se katetr odblokuje.

Použití:

- spojte dvě krátké hadičky s antibakteriálním filtrem
- spojte jeden konec odsávací hadičky se sacím přívodem. Všimněte si modré označení na filtru směrem nahoru. Spojte druhý konec s hrotem na víčku nádoby, který je označen značkou OUT.
- spojte sací hadici s hrotem na víčku nádoby s označením IN.
- spojte konec odsávacího vodiče (hadice) s přípojkou odsávacího katétru.
- zapněte síťový kabel do zástrčky
- zapněte gombík ON/OFF, po jeho zapnutí se rozsvítí světélko.

Síťový kabel se používá k odpojení odsávačky z napájení, je třeba správně uzemnit síťovou zásuvku.

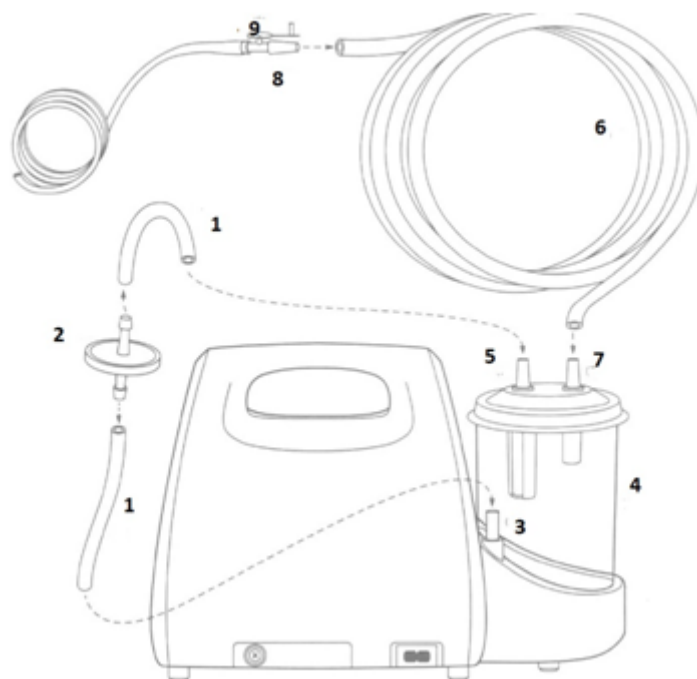

- 1) spojovací hadičky
- 2) vzduchový - antibakteriální filtr
- 3) přívod sání
- 4) nádoba na tělní tekutiny
- 5) hrot víčka "Out"
- 6) odsávací hadice
- 7) hrot víčka "IN"

8) přípojka katetru

9) katetr

Kontrola spojení

- otočte regulační ventil záporného tlaku ve směru hodinových ručiček, zablokujte přívod vzduchu s prstem nebo ohněte odsávací hadici a podržte.

- zapněte přístroj a zkontrolujte zda nevydává zvláštní zvuky. Manometr by měl rychle dosáhnout limitu záporného tlaku.

Po uvolnění vzduchového přívodu by měl indikátor manometru vrátit do polohy pod hodnotu 0,02MPa.

Pokud indikátor nevykazuje žádné výkyvy a odchylky spojení je správné.

- připojte odsávací katetr. Záporný tlak by měl být:

- méně než 0,06MPa při napojení katetru F6

- méně než 0,04 MPa při napojení katetru F8

- méně než 0,03 MPa při napojení katetru F12

Regulace záporného tlaku

- zablokujte přívod vzduchu a regulujte záporný tlak jeho regulátorem

Tak, aby indikátor vykazoval hodnotu mezi 0,02MPa a limitem záporného tlaku.

- nastavte záporný tlak podle vašich potřeb, můžete zvýšit záporný tlak, že otočíte kolečkem doprava (ve směru hodinových ručiček)

- před vypnutím odsávačky snižte záporný tlak na 0,02 MPa.

Při vypnutí odsávačky vypněte nejprve On/Off gombík a poté odpojte odsávačku ze sítě.

Kontrola a testování závodního (přepadového) systému

- Otevřete víko nádoby a vyčistěte přívod ventilu a gumové ventilové klapky na plaváku.

- vložte sací hadici do nádoby s čistou vodou nebo můžete simulovat skutečnou provoz.

Jako výsledek, při stoupání vody se plavák zvedne až po uzavření ventilu a zařízení se automaticky vypne.

Otočte regulátor záporného tlaku, vypněte odsávačku a otvorte víko nádoby a vyprázdněte ji. Plavák by měl být na spodní části podporného tělíska, zatímco ventil by měl být v otevřeném stavu.

Pokud se při kontrolním testu neobjeví žádné pochybnosti, nastavení je správné a můžete zařízení použít.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Sací hadici vyčistěte nasátím malé části vody přes hadici.

Po použití vyprázdněte a vyčistěte nádobku a víčko s měkkým hadříkem nebo houbou, vypláchněte části a sterilizujte (včetně přepadového systému, těsnicímu kroužku a hadiček). Odšroubujte přepadový ventil a oddělte plavák od podporného prvku, abyste mohli části důkladně vyčistit.

Neodpojujte gumové ventilové klapky od plaváku.

Pro odstranění zbytků hnisu použijte fyziologický solný roztok.

Vyměňte sací katetry. Doporučuje se používat jednorázové katetry.

Umístěte nádobku, víko a všechny hadičky do dezinfekčního roztoku v koncentraci 1: 500 na 1 hodinu.

Vnější obal odsávačky čistěte vlhkým hadříkem namočeným v dezinfekčním prostředku. Neotírejte místa, která obsahují znaky.

Antibakteriální filtr je třeba měnit každé tři měsíce při intenzivním používání, nebo alespoň jednou ročně při slabší provozu.

Sací katétr, odsávací hadičky: jednorázové použití, má být použit pro jednoho pacienta. Opakované použití může způsobit infekci.

Výměna pojistky

Pojistka je umístěna ve spodní části zařízení. Pokud si ji přejete vyměnit, vypněte odsávačku ze sítě, otvorte krytku, která chrání pojistku. Vyměňte pojistku a zavřete krytku.

TYP PORUCHY	PŘÍČINA	OPRAVA	Poznámka
Hodnota záporného tlaku <0,075Mpa	<ul style="list-style-type: none"> Hodnota záporného tlaku <0,075Mpa Únik ve spojích Uvolněný nebo otevřený regulační ventil Okolní prostředí není kompatibilní s požadavky na použití zařízení 	<ul style="list-style-type: none"> Odstraňte nečistoty, utáhněte nebo vyměňte víčko nádoby, těsnicímu kroužku a přípojku katetru. Upevněte všechna spojovací místa Utáhněte regulátor záporného tlaku na pevně. Přemístěte zařízení na vhodné místo 	Vyměnit poškození sací katetr
Záporný tlak > 0,04Mpa s výrazným snížením sací síly	<ul style="list-style-type: none"> Aktivita přepadového systému Blokované hadice Zablokovaný antibakteriální filtr 	<ul style="list-style-type: none"> Zapněte regulátor záporného tlaku aby se snížil tlak v hadici a znovu zašroubujte Uvolněte, vyčistěte nebo vyměňte hadice Vyměňte filtr za nový 	Vyprázdněte nádobku ještě předtím než se zcela naplní Vrch filtru (modrá bodka) je vzduchový přívod
Odsávačka je zapojena v síti, ale světelný indikátor nesvietí	<ul style="list-style-type: none"> Uvolněná el. zásuvka Vybitá pojistka Poškozený světelný indikátor 	<ul style="list-style-type: none"> Opravte nebo změňte el. zásuvku Vyměňte pojistku Vyměňte indikátor 	Je třeba vyhledat profesionální pomoc / technika
Vybitá pojistka	<ul style="list-style-type: none"> vysoké napětí Vnitřní poškození el. zapojení Pumpa je zablokována a zvyšuje se proud 	<ul style="list-style-type: none"> Zařízení připojte do správného zdroje napětí Zkontrolujte zařízení a odstraňte chybu Zkontrolujte pumpu a motor 	Vyhledejte profesionální pomoc

Oprava poškozeného kompresoru by měla být provedena specialistou.

V případě potřeby kontaktujte dodavatele.

Korejská kosmetická maska na obličej s ceramidy, 30 ml

Návod na použití



Žádné mikroplasty, PEG-y, silikony, parafin, alergeny, minerální oleje, sulfáty.
Krémová maska s řešením CERA-BIOME důkladně hydratuje a posiluje zdravoukožní bariéru.

Použití

Naneste masku rovnoměrně na obličej. Po 10 - 20 minutách masku odstraňte a zbývající esenci jemně vklepte do pokožky.

Ingredients.

Aqua, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Ceramide NP, Ceramide AP, Lactobacillus Ferment. Bacillus Ferment, Aspergillus Ferment. Panthenol, Allantoin, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hyaluronic Acid, Methylpropanediol, Hydroxypropyl Starch Phosphate, 1,2-Hexanediol, 04-22 Alcohols, Hydroxyacetophenone, Cetearyl Alcohol. Hydrogenated Poly(C6-14 Olefin), 02-20 Alkyl Glucoside, Carbomer, Arginine, Helianthus Annuus Seed Oil. Betaine. Ethylhexylglycerin. Dipotassium Glycyrrhizate, Xanthan Gum. Disodium EDTA Pelargonium Graveolens Flower Oil. Hydrogenated Lecithin, Glucose, Sea Water. Butylene Glycol, Ulmus Campestris Bark Extract Glycine Max Seed Extract Polyglyceryl-10 Stearate, Lactobacillus Ferment Lysate. Rose Flower Oil, Citronellol

Manufactured for. GP Europe GmbH, Westhafenplatz 1. 60327, Frankfurt am Main, Germany
EU R.P. OBELIS S.A - Bd General, Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium