

Sestavení:

1. Sejměte všechny plastové obaly (nezapomeňte na obaly na kolečkách)
2. Postavte chodítko na rovnou podložku
3. Tiskněte sedátko čtyřkolky směrem dolů, dokud neuslyšíte šetrnému klepnutí.
4. Odstraňte připevněné rukojeti a zasuňte je do příslušných otvorů, a ty nastavte na potřebnou výšku pomocí pěticípých šroubů které jsou přibaleny ke čtyřkolce.
5. Pro bezpečné připevnění v rámu musí být rukojeti zasunuty minimálně 10cm. Brzdové páčky musí po přitažení směřovat dolů. Pokud mají jinou polohu, rozmontujte je a nastavte do požadované polohy.
6. Košík si můžete uložit pod nebo před sedátko.
7. Opěrku si připevníte pomocí uzavíracího kolíku: ujistěte se, že kolík je správně umístěn v příslušném otvoru.

Používání chodítka

- Parkovací brzdu aktivujete otištěním černé páčky od rukojeti. Přitažením této páčky k rukojeti uvolníte parkovací brzdu a aktivujete i přibrzdňovací brzdu, která slouží ke zpomalování chodítka při chůzi tak aby poskytovalo dobrou oporu.
- Pro usnadnění přepravy můžete chodítko zase složit.

Bezpečnostní pokyny

Chodítko používejte pokud možno na rovných plochách a snažte se vyhnout všem nerovnostem jako jsou vpusti do kanálů a podobně. Za mokra a na sněhu se brzdám snižuje účinnost a hrozí nebezpečí úrazu i poškození chodítka. V extrémních povětrnostních podmínkách je lepší chodítko nepoužívat.

Brzdy jsou nastavitelné a pro bezpečnost provozu je nutno kontrolovat, zda jsou nastaveny obě stejně.

Chodítko se nesmí přetěžovat - maximální možná hmotnost přepravovaných předmětů je 10 kg a maximální možná hmotnost uživatele je 110 kg.

Údržba:

Chodítko čistěte jemnými saponátovými prostředky.

Materiál:

Rám - ocelové trubky

Madla - PVC

Sedadlo - Umělá kůže

Technické údaje:

Hmotnost 8 kg

Výška sedačky od země 55,5 cm

Rozměr sedáku 33 x 35,5 cm

Nosnost 110 kg

Nastavitelná výška rukojetí od 80 do 92 cm

Celková šířka 62 cm

Celková hloubka 68 cm

Vnitřní šířka 45,5 cm