

NÁVOD K OBSLUZE

Sprchovací židle s ručkami



1. Provedení

Sprchová stolička se skládá z hliníkového rámu, opěradla a širokého sedáku z odolného PVC. Má výškově nastavitelné nohy zakončené protiskluzovými pryžovými násadci a boční rukojeti potažené pěnou pro snadné používání. Speciálně navržené pryžové koncovky nohou účinně zabraňují uklouznutí na mokrému povrchu. Stolička je navíc vybavena systémem TF pro snadnou montáž.

Sada obsahuje: sedák s podstavcem stoličky, výškově nastavitelné nohy - 4 ks., boční rukojeti - 2 ks., opěradlo - 1 ks., montážní trubky opěradla - 2 ks., trubky podstavce stoličky - 2 ks., krátké montážní šrouby (motýlkové šrouby) - 5 ks., dlouhé montážní šrouby (motýlkové šrouby) - 4 ks.

Součásti:

- A.** opěradlo
- B.** montážní trubka opěradla
- C.** sedák
- D.** trubka podstavce stoličky
- E.** boční rukojeť
- F.** aretační kolík rukojeti
- G.** výškově nastavitelná noha - systém TF
- H.** protiskluzový násadec



2. Použití

Sprchová stolička je pomůcka, která uživateli usnadňuje provádění hygienických úkonů. Doporučuje se pro osoby se sníženou mobilitou, která znemožňuje nebo ztěžuje samostatné provádění činností denního života. Stolička se doporučuje pro použití ve sprchách, vanách, koupelnách a jiných vlhkých prostorách v domácnostech i nemocnicích.

3. Montáž

Krok 1. Sestavte opěradlo s trubkami opěradla pomocí čtyř montážních šroubů (křídlových šroubů).

Krok 2. Namontujte trubky opěradla do montážních otvorů umístěných pod sedadlem, dokud nezacvaknou zajišťovací kolíky.

Krok 3. Postavte sestavenou židli na nohy.

Krok 4. Namontujte boční područky do montážních otvorů umístěných na vnější straně sedadla.

NASTAVENÍ VÝŠKY

Chcete-li nastavit výšku stoličky, zatlačte aretační kolík, zvolte požadovanou výšku nohou a následně polohu zajistěte pomocí kolíku. Nohy jsou nastavitelné v krocích po 2,5 cm. Pozor! Všechny nohy musí být nastaveny ve stejné úrovni.

4. Technické parametry

Šířka	48 cm
Hloubka	40 cm
Výška sedáku	37-49 cm
Celková výška	66-79 cm
Rozměry sedáku	40 x 33 cm
Hmotnost	3,1 kg
Maximální zatížení	136 kg

5. Připomínky a doporučení

Společnost Timago International Group neodpovídá za nesprávné použití stoličky, nedodržení bezpečnostních pravidel nebo použití k jinému než určenému účelu.

6. Údržba

- Stoličku je třeba pravidelně čistit vodou, houbou a jemnými čisticími prostředky na plasty, např. mýdlem nebo jemnými čisticími prostředky schválenými hygienickým ústavem, a po každém použití ji otřít do sucha.
- K čištění **nepoužívejte žádné** z následujících prostředků: silné čisticí prostředky, brusné prostředky, bělidla, benzín nebo jakákoli rozpouštědla (hrozí poškození rámu, viditelné vady a následná ztráta záručních práv).

- Systematicky kontrolujte: dotažení motýlkových šroubů, stav aretačních kolíků, stav trubek. Doporučuje se pravidelná kontrola pryžových násadců. Pokud jsou opotřebované, vyměňte násadec za nový.

7. Podmínky skladování a přepravy

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.

8. Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou popsány v záručním listu, který jste obdrželi. Doklad o nákupu (účtenka nebo faktura) musí být uchován pro účely záruky.

9. Popis

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo série		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem k použití
	Výrobce posoudil shodu se základními požadavky na zdravotnické prostředky.		



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



03/2025 (I)

Distributor



UNIZDRAV CZ, s.r.o.
Na Folimance 2155/15,
Vinohrady 120 00 Praha 2
Česká republika

Kontakt
212 246 463
obchod@unizdrav.cz
www.unizdrav.cz